

MightyDouble チェックソフトマスタ・薬剤写真の更新手順


三栄メディシス株式会社

- 毎月、株式会社エーアイエス様から弊社に更新ファイルが提供されます。
弊社からユーザー様へのご提供の準備が整い次第、シンプティから更新ファイルをダウンロードできるようになります。
- 更新作業はサーバー機（親機）で行います。
- 薬剤写真の更新は、年４回（１月・４月・７月・１０月）です。
※薬剤写真はオプションです。ご契約いただいているユーザー様へのご提供となります。
- 更新作業中は、すべてのパソコンで点検処理（オーダーチェック、お薬辞典の参照、および MightyDouble の使用）ができません。
- 更新作業には、５分～６０分程度の時間がかかります。
- 更新作業後は必ず、MightyDouble のシステムバックアップを行ってください。
- 更新手順の中に、更新完了のチェックを入れる作業があります。これは、シンプティが MightyDouble の更新状況を機械的に取得できないため、ユーザー様にて行っていただいております。従いまして、チェックの有無と更新の状況は一致しない場合がありますことを予めご了承ください。
- 手順通りに更新作業ができないときは、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
サポート専用ダイヤル ０１２０－４９０－０９８

① チェックソフト更新のお知らせ

1. 更新プログラムが提供されると、ログイン時に下記のメッセージが表示されます。

をクリックします。

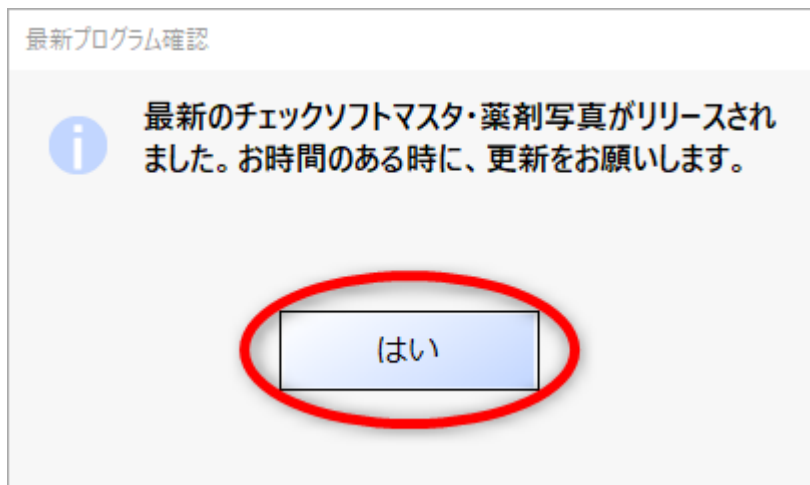


薬剤写真はオプションにつき、表示されない場合があります。リリースは1月・4月・7月・10月の年4回です。

2. 受付画面より ボタンをクリックします。




3. 最新プログラム確認の表示で をクリックします。

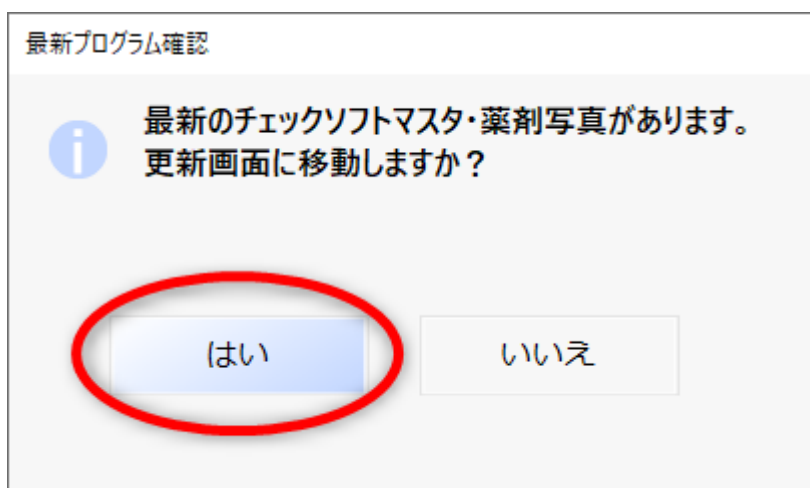

薬剤写真はオプションにつき、表示されない場合があります。リリースは1月・4月・7月・10月の年4回です。

4. プログラム提供状況が表示されます。

画面右下タスクトレイ内の  アイコンをダブルクリックします。

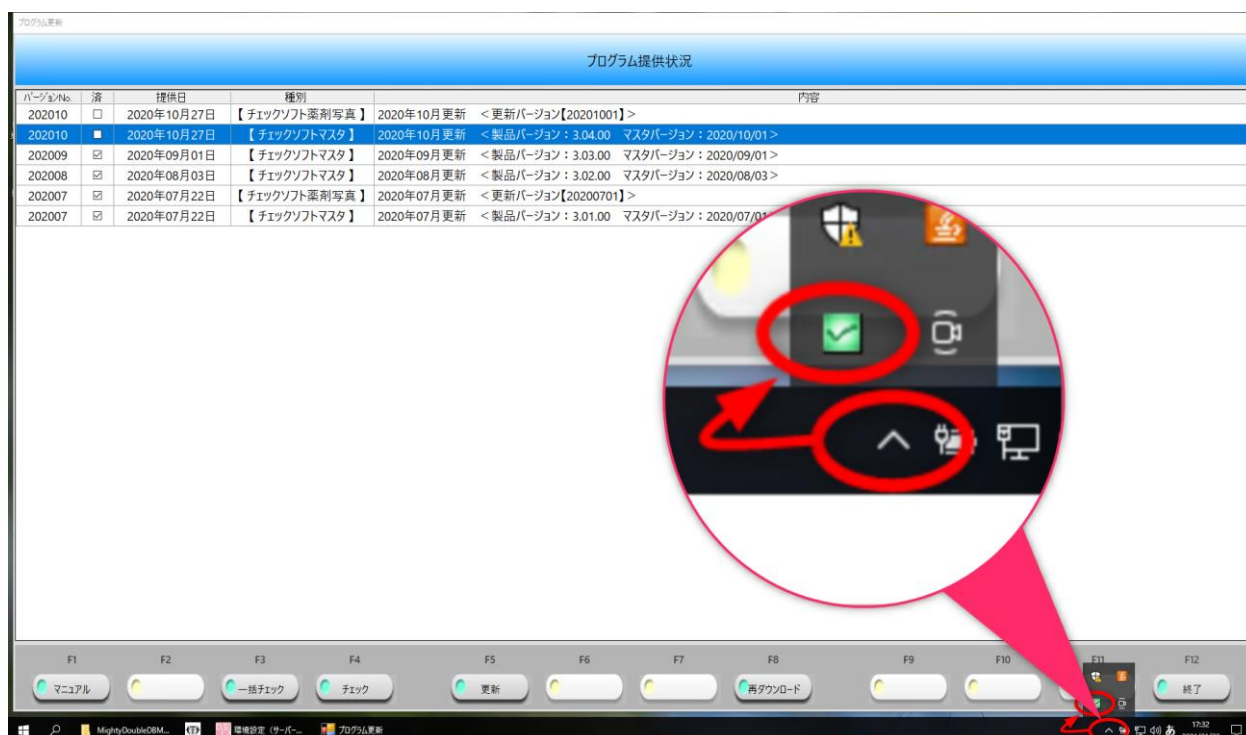

5. 下記メインメニューが表示されましたら、「停止」ボタンをクリックします。



6. 「終了」ボタンをクリックします。



7. プログラム提供状況から、選択されている行（青色の行）の種別を確認します。

プログラム提供状況				
バージョンNo.	済	提供日	種別	内容
202010	☐	2020年10月27日	【チェックソフト薬剤写真】	2020年10月更新 <更新バージョン【20201001】>
202010	☒	2020年10月27日	【チェックソフトマスタ】	2020年10月更新 <製品バージョン：3.04.00 マスタバージョン：2020/10/01>
202009	☒	2020年09月01日	【チェックソフトマスタ】	2020年09月更新 <製品バージョン：3.03.00 マスタバージョン：2020/09/01>
202008	☒	2020年08月03日	【チェックソフトマスタ】	2020年08月更新 <製品バージョン：3.02.00 マスタバージョン：2020/08/03>
202007	☒	2020年07月22日	【チェックソフト薬剤写真】	2020年07月更新 <更新バージョン【20200701】>
202007	☒	2020年07月22日	【チェックソフトマスタ】	2020年07月更新 <製品バージョン：3.01.00 マスタバージョン：2020/07/01>

7.1 【チェックソフトマスタ】の場合

次ページの「②チェックソフトマスタの更新」へ、お進みください。

バージョンNo.	済	種別	
202010	☐	【チェックソフト薬剤写真】	2020年10月更新
202010	☒	【チェックソフトマスタ】	2020年10月更新
202009	☒	【チェックソフトマスタ】	2020年09月更新

7.2 【チェックソフト薬剤写真】

10 ページの「③チェックソフト薬剤写真の更新」へ、お進みください。


バージョンNo.	済	種別	
202010	☒	【チェックソフト薬剤写真】	2020年10月更新
202010	☒	【チェックソフトマスタ】	2020年10月更新
202009	☒	【チェックソフトマスタ】	2020年09月更新



チェックソフト薬剤写真はオプションにつき、表示されない場合があります。
またリリースは1月・4月・7月・10月の年4回です。

② チェックソフトマスタの更新


1. **F 5 更新** ボタンをクリックします。(以降の図は2020年10月更新の例です)

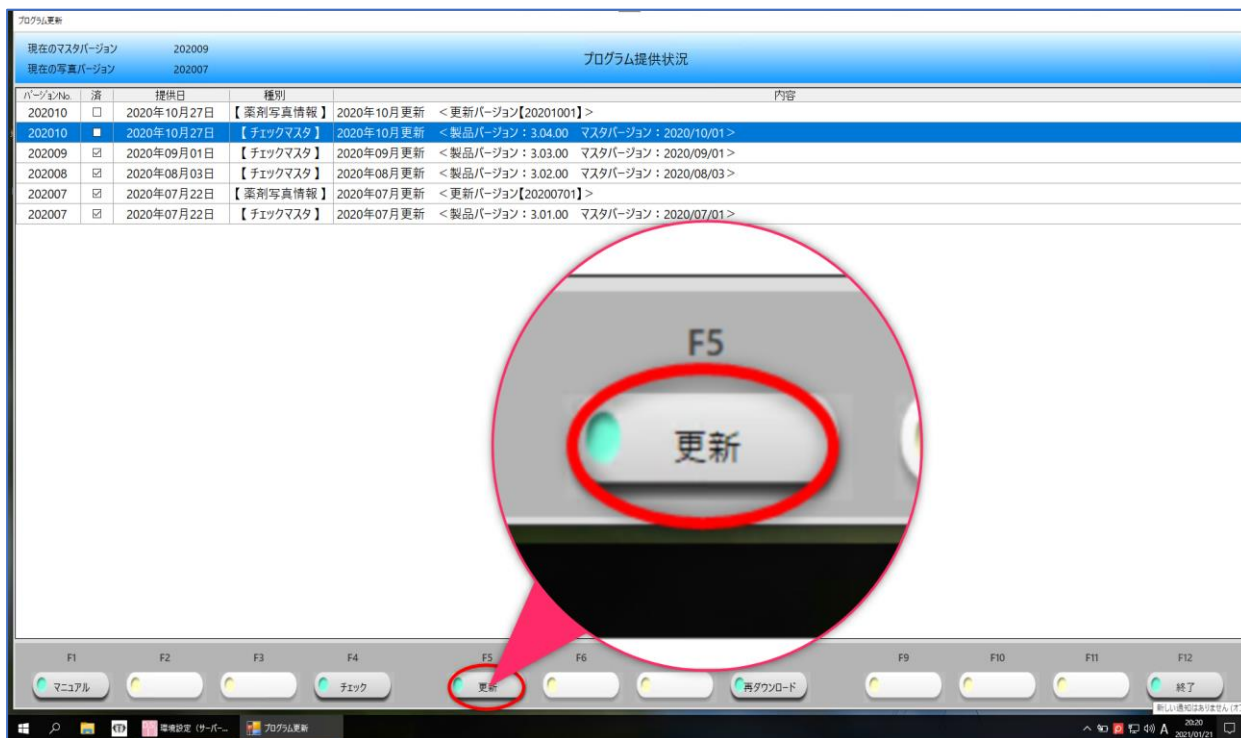


2. 更新ファイルのダウンロードが始まります。




3. 更新用フォルダが表示されましたら、「Double_年月」をダブルクリックします。

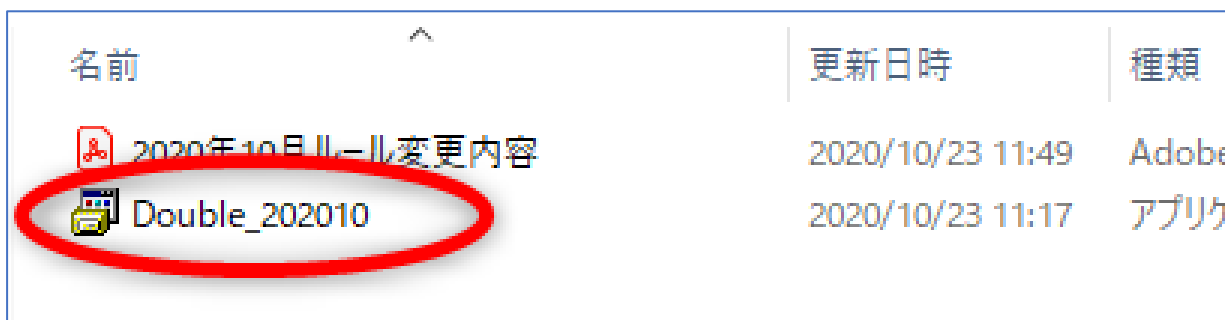

4. 下記の画面が表示されましたら、解凍 ボタンをクリックします。

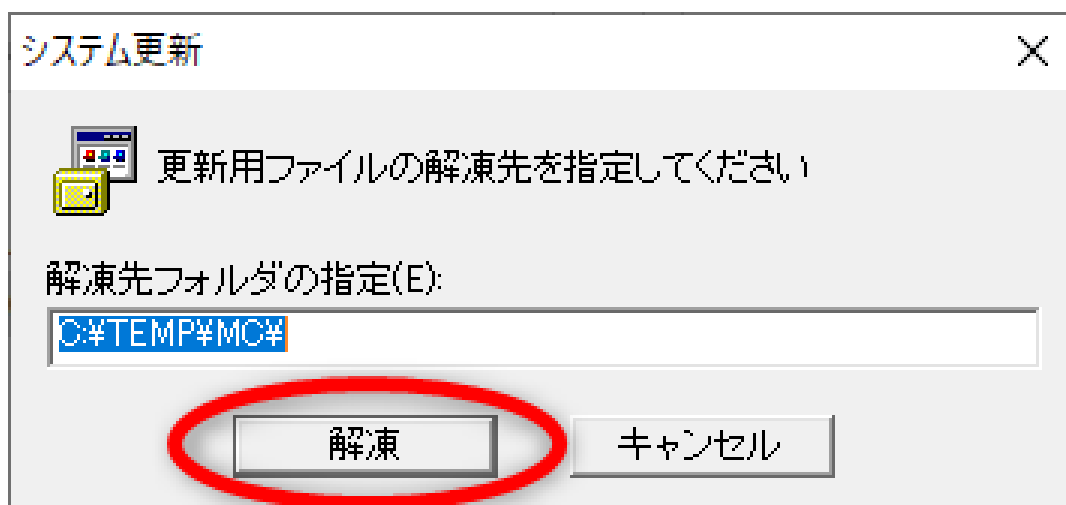

5. はい をクリックします。

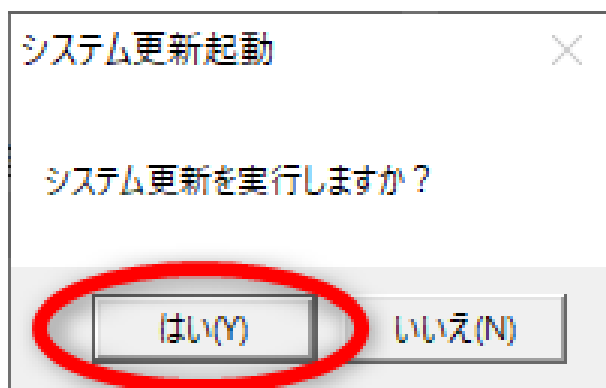


下記のメッセージが表示されたときは、19 ページ（ア）の操作方法を参照してください。




コンピュータ名が表示されます。

6. システムの更新が始まります。(この間、特に操作はありません)

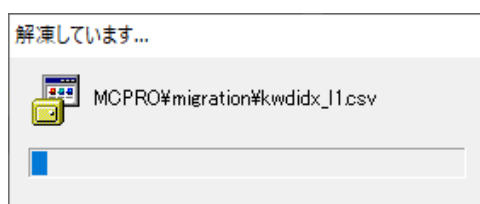

ファイルコピー中です。しばらくお待ちください。

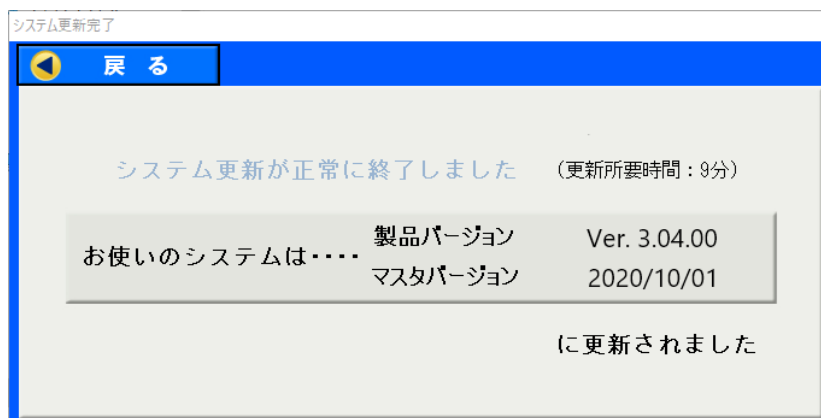

途中でメッセージが隠れてしまうことがあります。しばらく経過してもメッセージが表示されないときは、21 ページ (イ) の操作を参照してください。

下記のメッセージが表示されたときは、22 ページ (ウ) を参照してください。



システム更新を行うことができませんでした。

原因：更新条件を満たしていない為、更新を行うことができません。

7. 更新が完了すると「製品バージョン」と「マスタバージョン」が表示されます。
プログラム提供状況の最新バージョンになっていることを確認してください。



更新用フォルダのウィンドウが重なって最新バージョンが見えないときは、次ページ手順9を先に行い、ウィンドウを閉じてください。

プログラム提供状況

【薬剤写真】	2020年10月更新	<更新バージョン【20201001】>
【マスタ】	2020年10月更新	<製品バージョン：3.04.00 マスタバージョン：2020/10/01>
【マスタ】	2020年09月更新	<製品バージョン：3.03.00 マスタバージョン：2020/09/01>

システム更新完了

戻る

システム更新が正常に終了しました (更新所要時間：9分)

お使いのシステムは……

製品バージョン	Ver. 3.04.00
マスタバージョン	2020/10/01

に更新されました

8. 戻る ボタンをクリックします。

システム更新完了


戻る

システム更新が正常に終了しました (更新

9. 更新フォルダのウィンドウを、右上の「×」ボタンをクリックして閉じます。



10. F 4 チェック ボタンをクリックします。

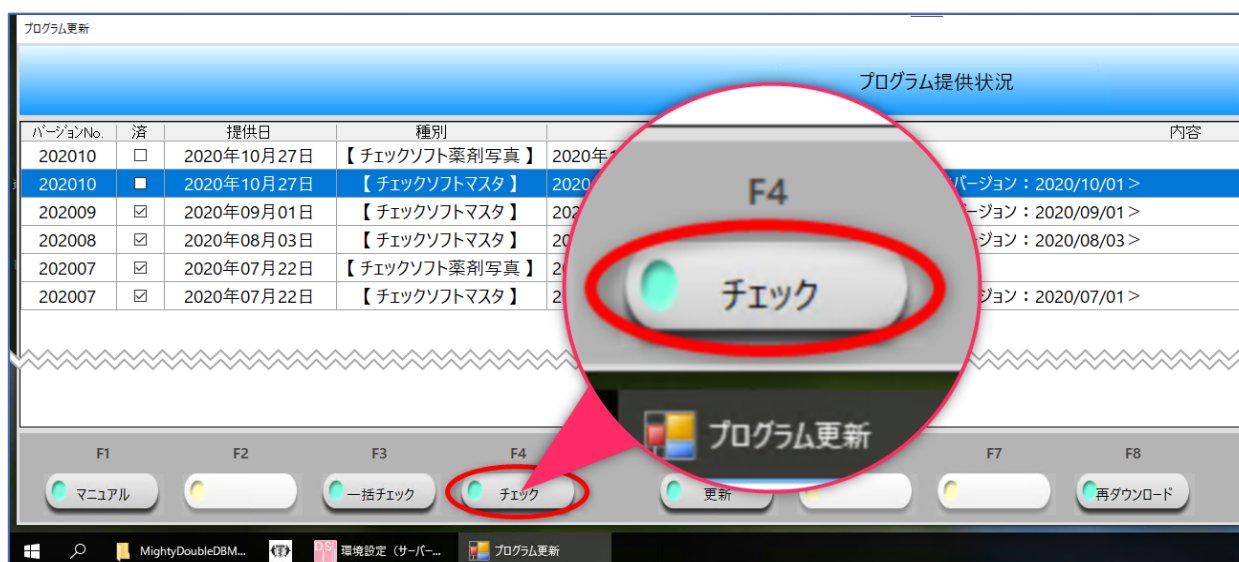

- 10.1 【チェックソフト薬剤写真のリリースが**無い**場合】 チェックが入ったことを確認して、15 ページの「④システムバックアップ」へ、お進みください。

バージョンNo.	済	提供日	種別
202010	☒	2020年10月27日	【チェックソフトマスタ】

- 10.2 【チェックソフト薬剤写真のリリースが**有る**場合】 チェックが入ったことを確認し、次ページの「③チェックソフト薬剤写真の更新」へ、お進みください。


バージョンNo.	済	提供日	種別
202010	☐	2020年10月27日	【チェックソフト薬剤写真】
202010	☒	2020年10月27日	【チェックソフトマスタ】



チェックソフト薬剤写真はオプションにつき、表示されない場合があります。
リリースは1月・4月・7月・10月の年4回です。

③ チェックソフト薬剤写真の更新

1. **F 5 更新** ボタンをクリックします。(以降の図は2020年10月更新の例です)

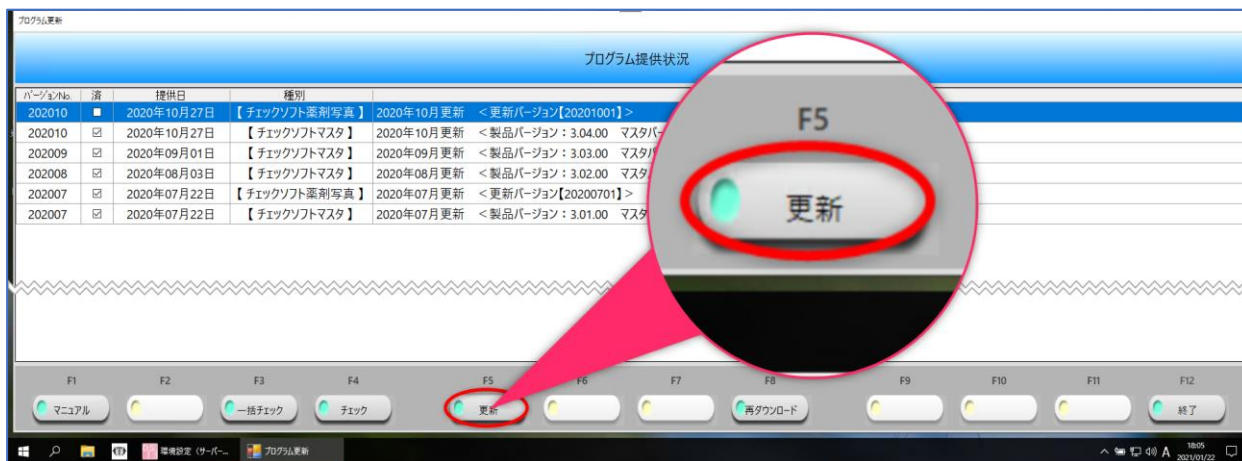


2. 更新ファイルのダウンロードが始まります。





3. 更新用フォルダが表示されましたら、「PhotoInstallTool」をダブルクリックします。



※「Photo～」から始まるファイル名が3つありますので、注意してください。

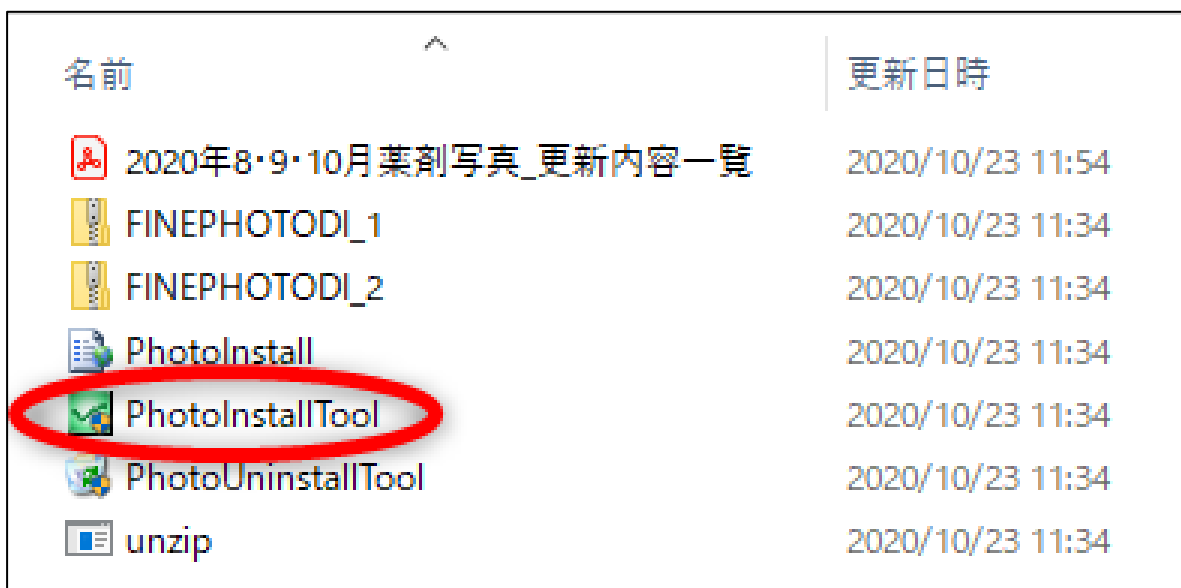


4. 下記の画面が表示されましたら、インストール開始 ボタンをクリックします。

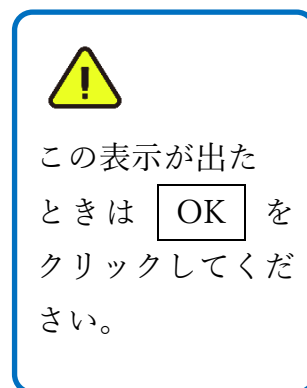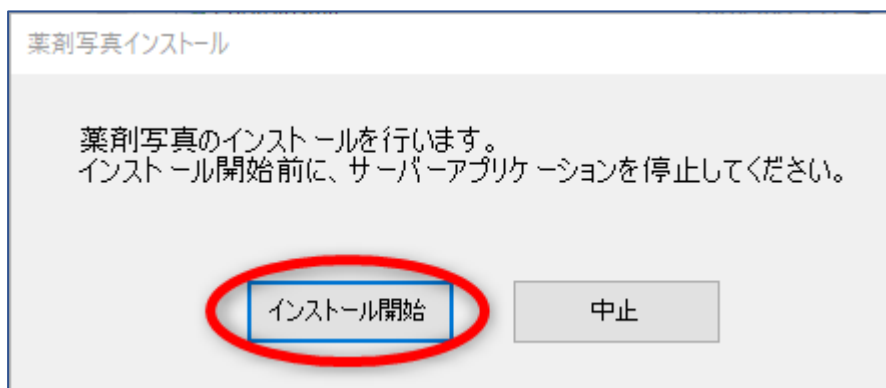

5. [OK] をクリックします。

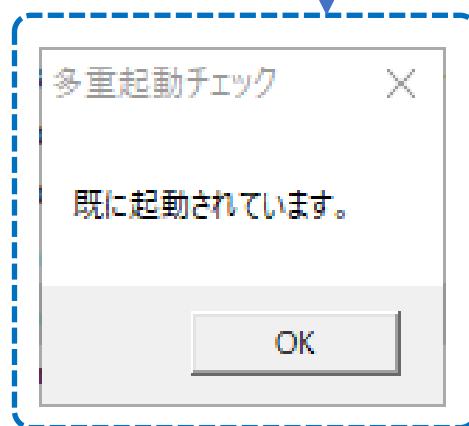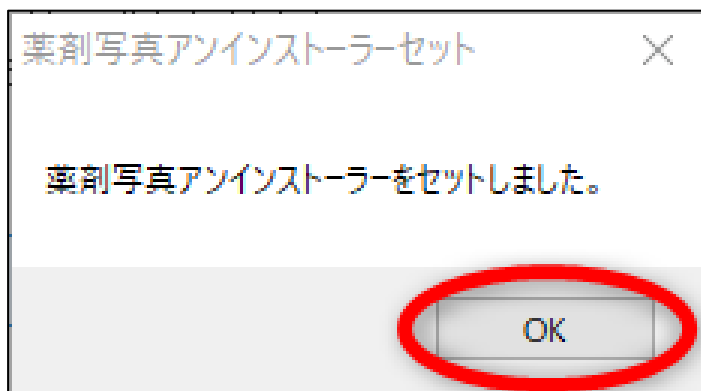

下記のエラーが表示されたときは、24 ページ（エ）を参照してください。

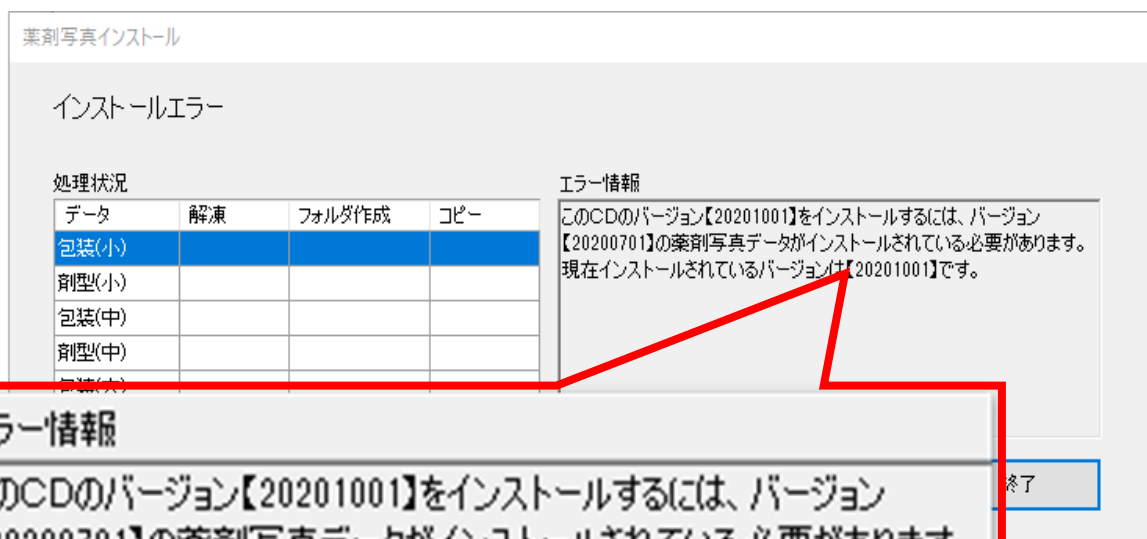

エラー情報

このCDのバージョン【20201001】をインストールするには、バージョン【20200701】の薬剤写真データがインストールされている必要があります。現在インストールされているバージョンは【20201001】です。

6. 薬剤写真の更新が始まります。(この間、特に操作はありません)

薬剤写真インストール

薬剤写真データの解凍中です。

処理状況

データ	解凍	フォルダ作成	コピー
包装(小)	完了		
剤型(小)	処理中		
包装(中)			
剤型(中)			
包装(大)			
剤型(大)			

エラー情報

しばらくお待ちください

中止

薬剤写真インストール

新しいバージョンのデータフォルダを作成しています。

処理状況

データ	解凍	フォルダ作成	コピー
包装(小)	完了	完了	
剤型(小)	完了	完了	
包装(中)	完了	完了	
剤型(中)	完了	処理中	
包装(大)	完了		
剤型(大)	完了		

エラー情報

しばらくお待ちください

中止

薬剤写真インストール

解凍したデータをコピーしています。

処理状況

データ	解凍	フォルダ作成	コピー
包装(小)	完了	完了	完了
剤型(小)	完了	完了	処理中
包装(中)	完了	完了	
剤型(中)	完了	完了	
包装(大)	完了	完了	
剤型(大)	完了	完了	

エラー情報

中止

薬剤写真インストール

薬剤写真データのインストールが完了しました。
更新バージョン【20201001】

処理状況

データ	解凍	フォルダ作成	コピー
包装(小)	完了	完了	完了
剤型(小)	完了	完了	完了
包装(中)	完了	完了	完了
剤型(中)	完了	完了	完了
包装(大)	完了	完了	完了
剤型(大)	完了	完了	完了

エラー情報

OK

7. 更新が完了すると「更新バージョン」が表示されます。
プログラム提供状況の最新バージョンになっていることを確認してください。



更新用フォルダのウィンドウが重なって最新バージョンが見えないときは、次ページ手順9を先に行い、ウィンドウを閉じてください。

プログラム提供状況

写真】	2020年10月更新	<更新バージョン【20201001】>
スタ】	2020年10月更新	製品バージョン：3.04.00 マスタバージョン：2
スタ】		
スタ】		
写真】		
スタ】		

薬剤写真インストール

薬剤写真データのインストールが完了しました。
更新バージョン【20201001】

処理状況				エラー情報
データ	解凍	フォルダ作成	コピー	
包装(小)	完了	完了	完了	
剤型(小)	完了	完了	完了	
包装(中)	完了	完了	完了	
剤型(中)	完了	完了	完了	
包装(大)	完了	完了	完了	
剤型(大)	完了	完了	完了	


8. ボタンをクリックします。

薬剤写真インストール


薬剤写真データのインストールが完了しました。
更新バージョン【20201001】

処理状況				エラー情報
データ	解凍	フォルダ作成	コピー	
包装(小)	完了	完了	完了	
剤型(小)	完了	完了	完了	
包装(中)	完了	完了	完了	
剤型(中)	完了	完了	完了	
包装(大)	完了	完了	完了	
剤型(大)	完了	完了	完了	

9. 更新フォルダのウィンドウを、右上の「×」ボタンをクリックして閉じます。

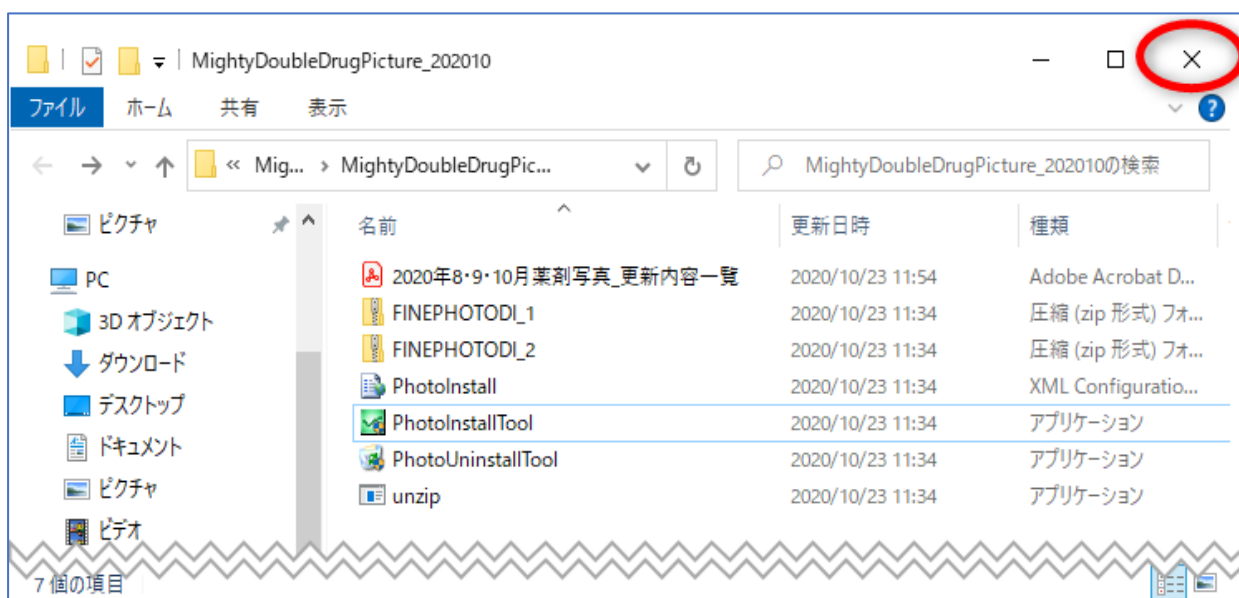

10. F 4 チェック ボタンをクリックします。

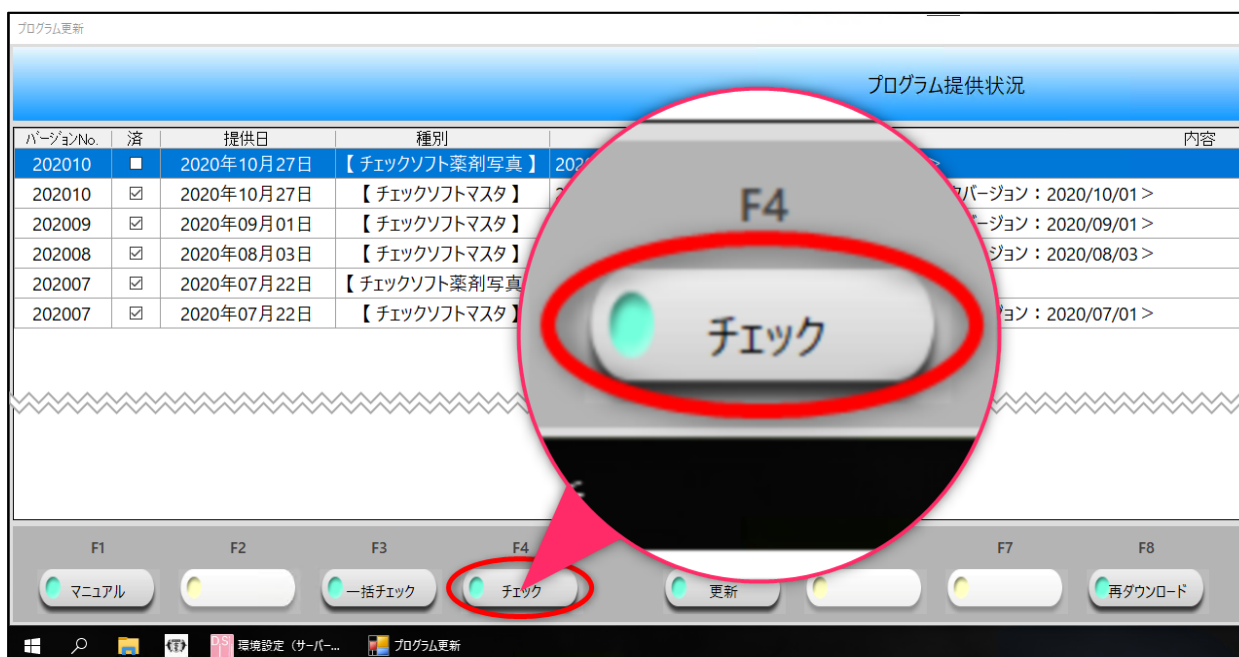


11. チェックが入ったことを確認して、次ページ「④システムバックアップ」の作業を行ってください。

バージョンNo.	済	提供日	種別	
202010	☒	2020年10月27日	【チェックソフト薬剤写真】	2020年10月
202010	☒	2020年10月27日	【チェックソフトマスタ】	2020年10月


④ システムバックアップ

1. シンプティを終了して、デスクトップの表示まで戻ります。

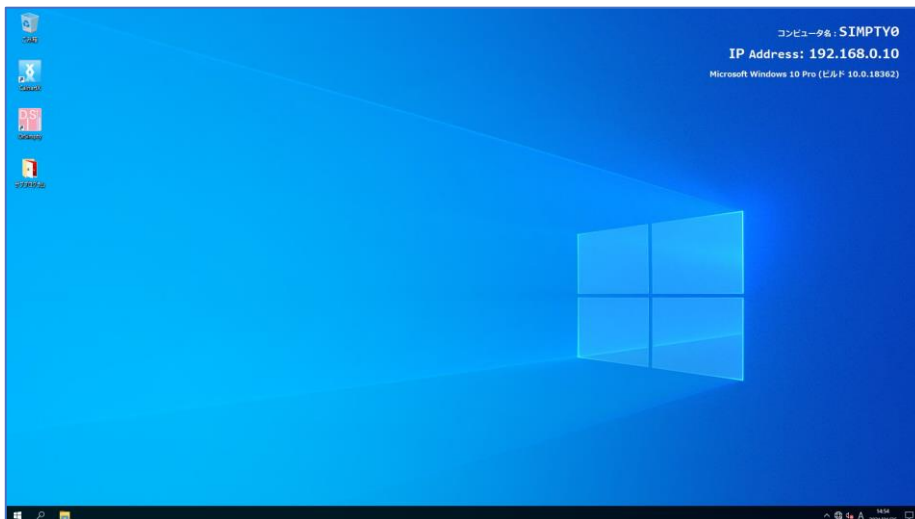


2. Windows のスタートボタン  をクリックします

3. スタートメニューにピン留めされた「システムバックアップ」をクリックします。

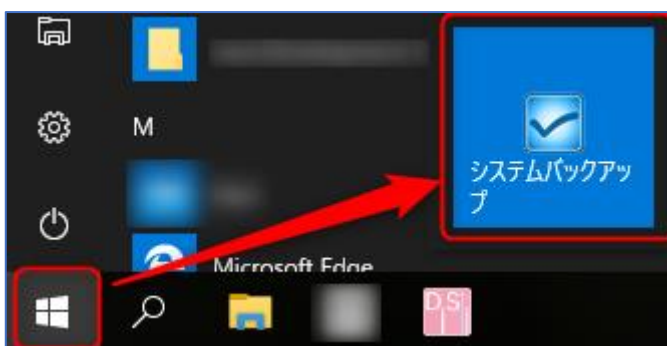


システムバックアップがスタートメニューにピン留めされていないときは、25 ページ (オ) の操作を参照してください。

4. 下記システムバックアップが表示されましたら、「保存」ボタンをクリックします。

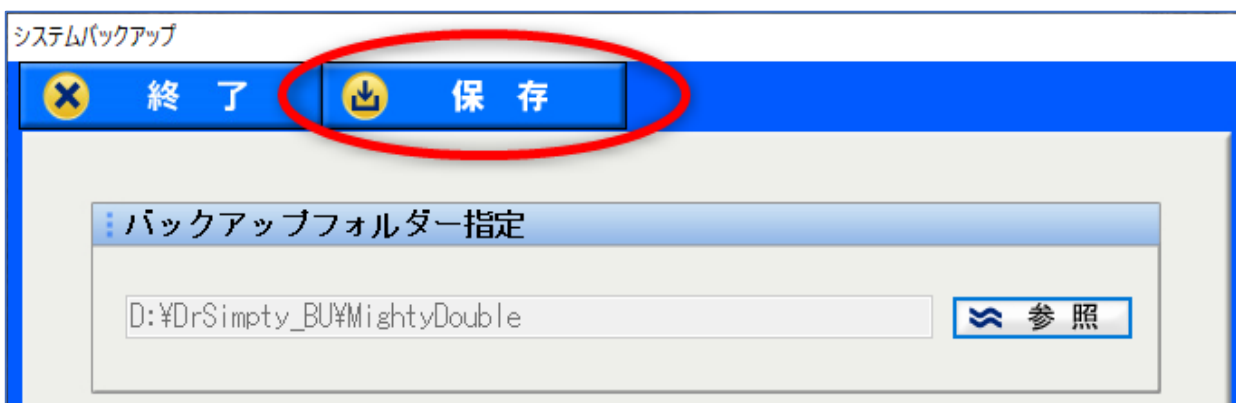


5. をクリックします。

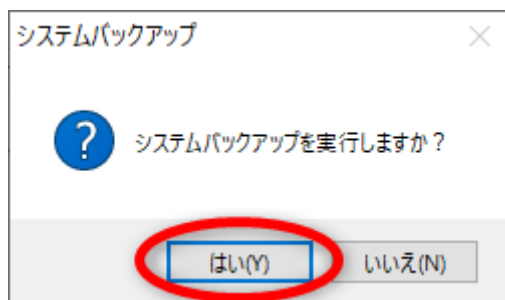

6. バックアップが始まります。(この間、特に操作はありません)



7. をクリックします。

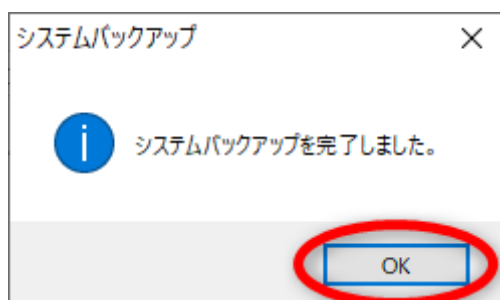


8. MightyDouble を起動します。

※環境フォルダの同期処理を行うため、更新後は必ず起動してください。

【方法 1】

デスクトップの「サブプログラム」→「MightyDouble」の順番でダブルクリックします。


※デスクトップ上に出ている場合もあります。

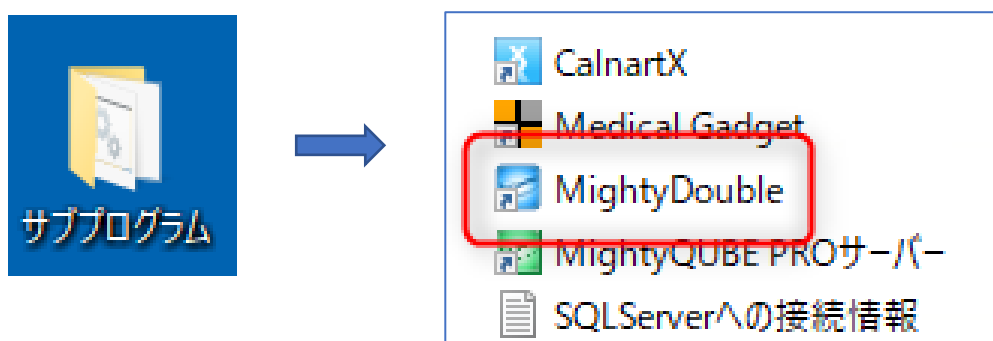


【方法 2】

① Windows のスタートボタン  をクリックします。


② アプリ一覧をスクロールして「MightyDouble」をクリックします。

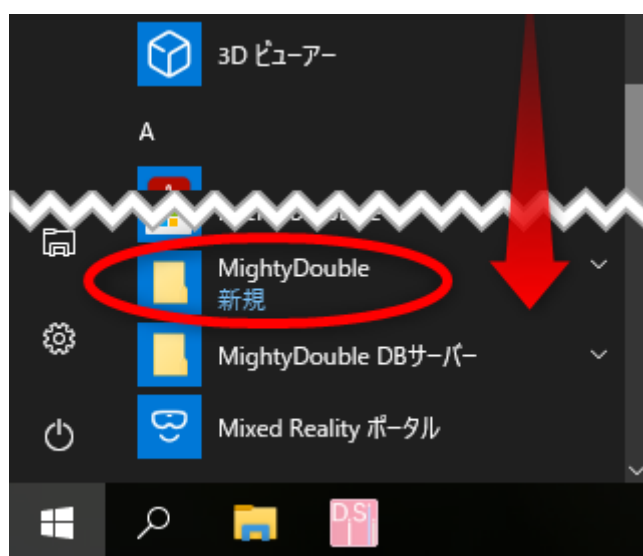

③ 「MightyDouble」をクリックします。

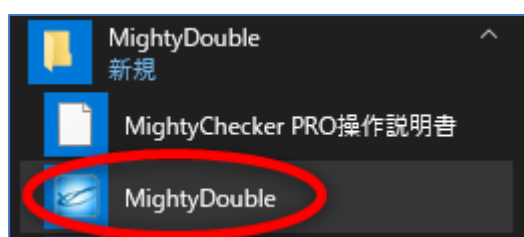


9. メインメニューが表示されましたら、「終了」をクリックします。

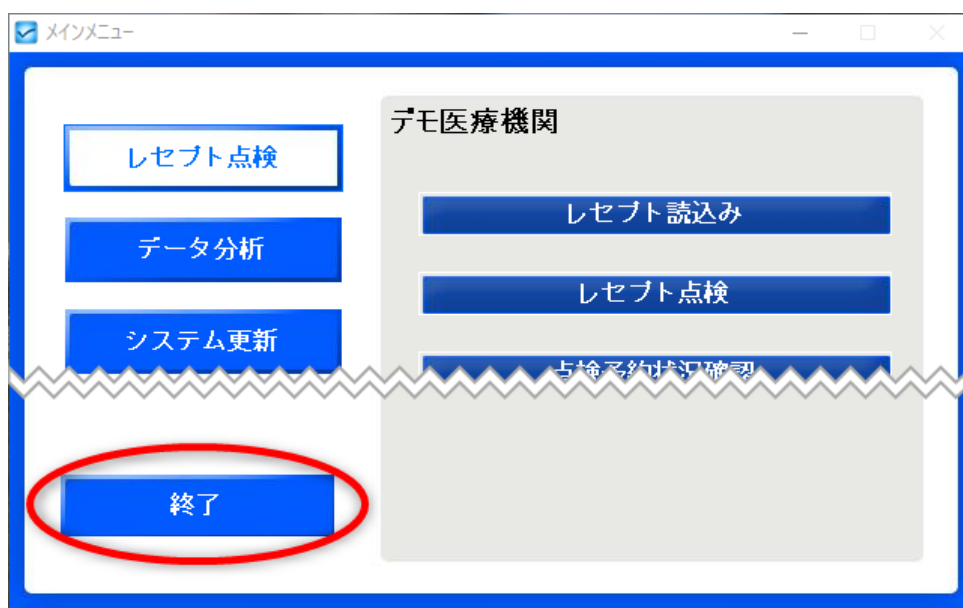

10. 「MightyQUBE PRO サーバー」を起動します。

【方法】

デスクトップの「サブプログラム」→「MightyQUBE PRO サーバー」の順番でダブルクリックします。※デスクトップ上に出ている場合もあります。

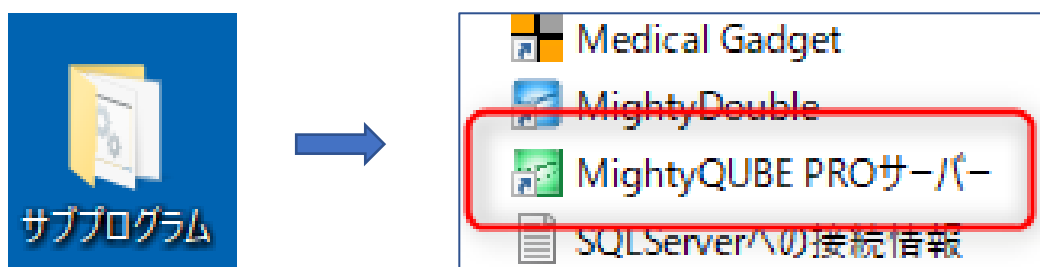

11. 画面右下のタスクトレイ内に「MightyQube PRO」アイコンが表示されていることを確認します。



12. 以上ですべての更新作業は完了です。


⑤ その他の操作

(ア) 「下記の端末でアプリケーションが起動中です」と表示された時


1. キャンセル をクリックします。



2. シンプティを終了して、デスクトップの表示まで戻ります。

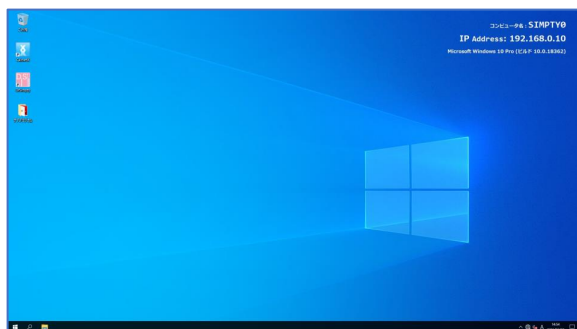

3. デスクトップの「サブプログラム」→「OthHaitaDelete - ショートカット」の順番でダブルクリックします。

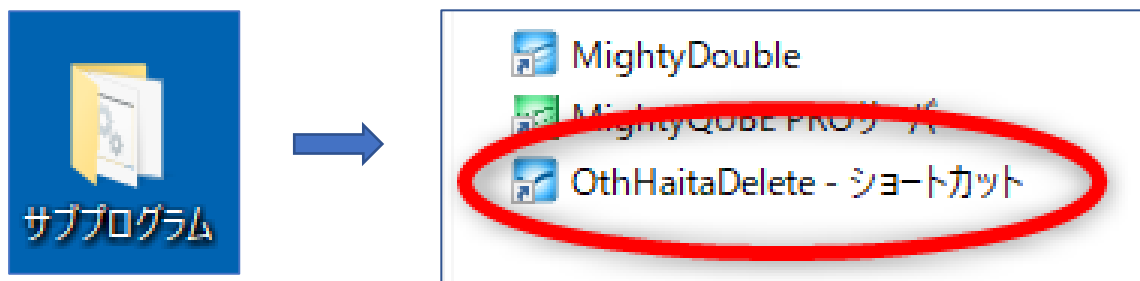

【サブプログラムに無い場合】

デスクトップ → PC → Windows(C:) → Tais → MCPRO
→ mccheck → bin →  OthHaitaDelete.exe をダブルクリックします。

4. 実行 ボタンをクリックします。

ルール排他削除ツール

◀ 戻る ● 実行 ▶

☒ 排他情報 ☐ ルール排他情報 ☐ 点検予約情報

機能種別	端末名
71	SIMPTY0

5. はい ボタンをクリックします。

排他制御ルール削除ツール

指定したデータを削除してもよろしいですか？

はい(Y) いいえ(N)

6. 戻る ボタンをクリックします。

ルール排他削除ツール

◀ 戻る ● 実行 ▶

☒ 排他情報 ☐ ルール排他情報 ☐ 点検予約情報

機能種別	端末名
------	-----

7. 再度、最初から更新作業をやり直してください。


(イ) 更新中のメッセージ（ウインドウ）が表示されない場合

メッセージがシンプルティや他のウインドウの後ろになっていることがあります。
次の操作でメッセージを前面に出してください。

1. 画面下部のタスクバーを確認します。



2. ボタンが横並びになっています。新しく表示されたメッセージやウインドウは右側に表示されていきますので、一番右側にあるボタンをクリックします。

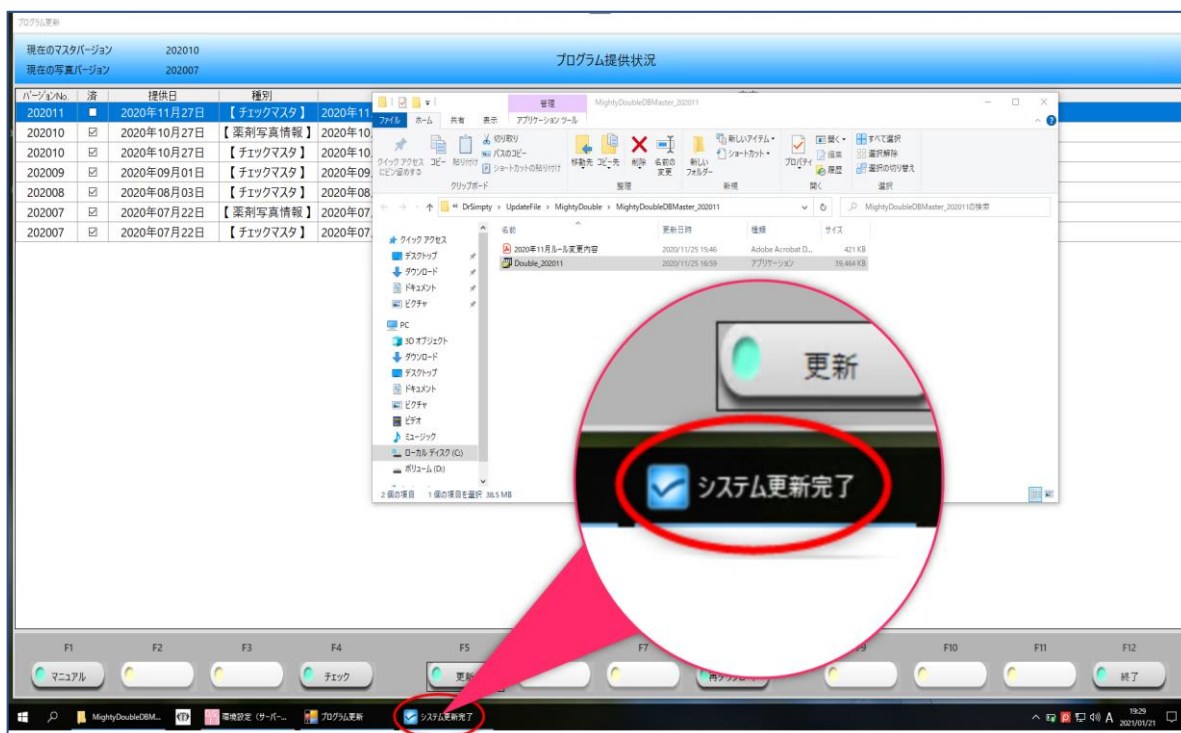


3. メッセージが表示されましたら、続きの操作を行ってください。

(ウ) 「システム更新を行うことができませんでした」と表示された場合

メッセージの「原因」に記載されている部分を確認します。

◆【更新条件を満たしていない為、更新を行うことができません】の場合

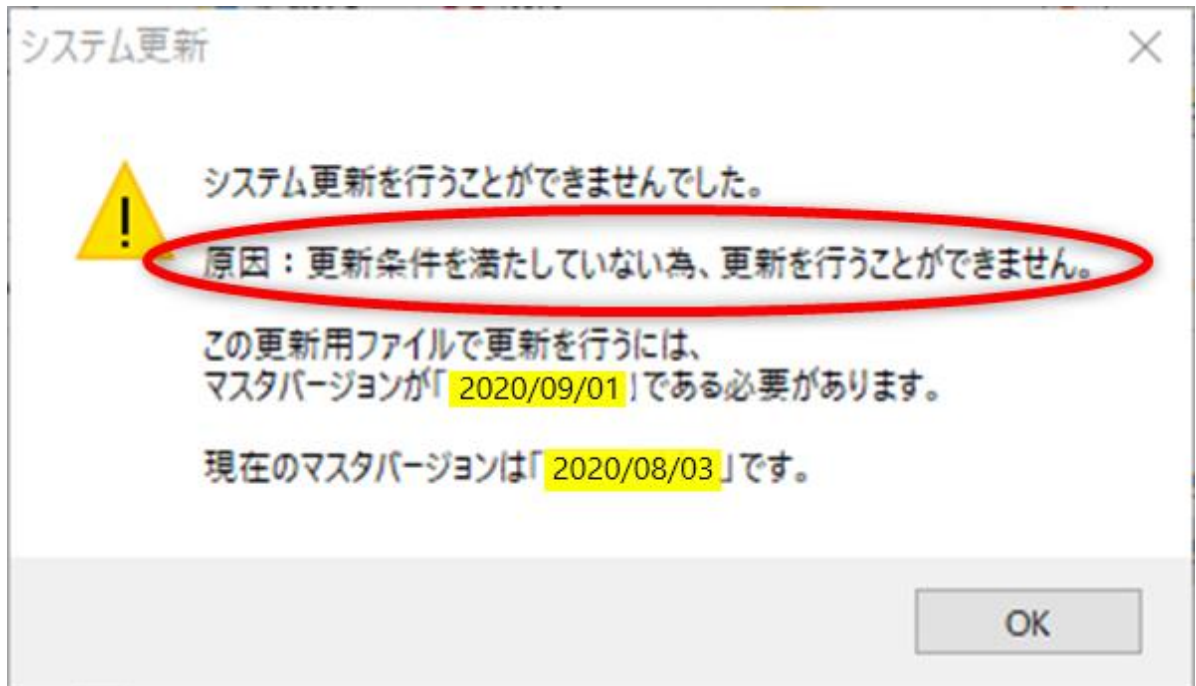

前回までの更新がされていないときに表示されます。更新ファイルは一ヶ月単位で順番に更新する必要があります。(毎月提供されます)

【対処方法】


1. メッセージ内の「現在のマスタバージョン」を確認します。
2. マスタバージョンは「年/月/日」の形式で記載されていますので、その翌月分から更新作業を行ってください。

例) 現在のマスタバージョンが「2020/08/03」のときは、2020年9月分から更新作業を行います。

3. 一ヶ月以上の期間が空いている場合は翌月分から順番に更新してください。

※ 2020年12月までの更新手順は、本手順書と操作方法が異なります。
ご不明な点は、弊社サポートセンター（1ページ）へご連絡ください。

◆【既にこの更新用ファイルは適用されています】の場合

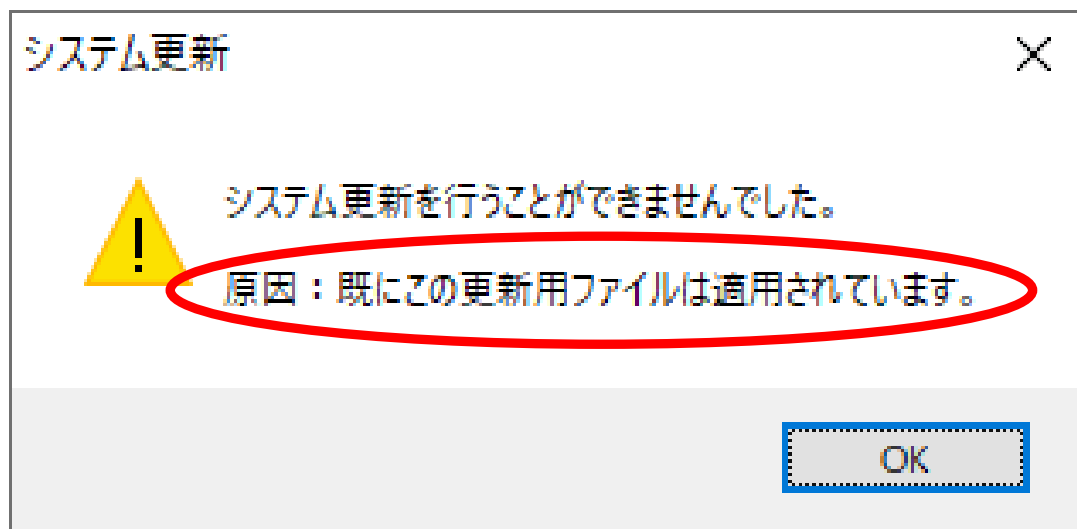

その年月の更新作業は完了しています。

プログラム提供状況の選択行にチェックが入っていない場合は、

F 4 チェック

ボタンをクリックしてチェックを入れてください。

(エ) 「インストールエラー」が表示された場合

「この CD のバージョン」と「現在インストールされているバージョン」を確認します。

エラー情報

このCDのバージョン【20201001】をインストールするには、バージョン【20200701】の薬剤写真データがインストールされている必要があります。現在インストールされているバージョンは【20200106】です。

◆ 両方のバージョンが異なる場合

前回の更新ができていないときに表示されます。更新ファイルは三ヶ月単位で順番に更新する必要があります。(年4回、1月・4月・7月・10月に提供されます)

※ 「この CD のバージョン」より「現在インストールされているバージョン」の方が新しい場合は、作業不要です。

【対処方法】

1. メッセージ内の「現在インストールされているバージョン」を確認します。
2. バージョンは「年/月/日」の形式で記載されていますので、その次の更新作業を行ってください。

例) 現在インストールされているバージョン 【2020/01/06】

→ 2020 年 4 月分の更新を行う。

3. 複数回分が空いている場合は、次回分から順番に更新してください。

※ 2020 年 12 月までの更新手順は、本手順書と操作方法が異なります。
ご不明な点は、弊社サポートセンター (1 ページ) へご連絡ください。

◆ 両方のバージョンが同じ場合


その年月の更新作業は完了しています。

プログラム提供状況の選択行にチェックが入っていない場合は、
ボタンをクリックしてチェックを入れてください。

F 4 チェック

(オ) 「システムバックアップ」がスタートにピン留めされていない場合

1. Windows のスタートボタン  をクリックします。
2. アプリ一覧をスクロールして「MightyDouble DB サーバー」をクリックします。

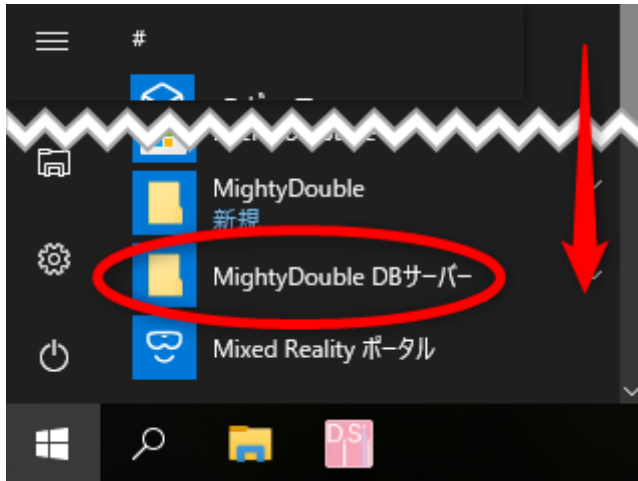

3. 「システムバックアップ」をクリックします。



【スタートメニューにピン留めする方法】

「システムバックアップ」を右クリックして、「スタートにピン留めする」をクリックしてください。

